

2019年 9月18日

キュータム「QT-500」ご愛用者様

日東工器株式会社

謹啓

平素は弊社製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、弊社携帯型吸引器「キュータム QT-500」(以下「本機器」といいます。)におきまして、ご使用の状況によりましては、まれな事例ながら、結露や塩素系ガス吸引により電源を入れましても、本機器が作動せず、ご使用頂けなくなる事例が確認されました。

この事例を受けまして、10月末からを目処に、順次、本機器をリニューアル品と交換させて頂きたく存じます。

なお、リニューアル品お届けまでの間、本機器をご使用なされますお客様におきましては、以下の1から5の項目につきまして、ご注意・ご確認、又ご実施を必ず行って頂きたく、お願い申し上げます。

1. 取扱説明書の該当箇所再確認のお願い
2. ご使用後のお願い（本機器のご使用後に必ずご実施ください）
3. お手入れのお願い
4. 代替の吸引手段ご用意のお願い
5. 受領書返信のお願い

謹白

記

販売名:携帯型吸引器 キュータム QT-500



## 1. 取扱説明書の該当箇所再度ご確認

本機器ご使用前の準備として、実施頂く特に重要な点として、次の①②にご注意ください。

本機器のご使用にあたりまして、ご使用される皆様に必ずご実施頂きますよう、お願いいたします。

- ① **本体の準備1**(取扱説明書7ページ 本体の準備 「1.」の記載事項です)  
ご使用前に、「ホース付フィルタ」が取り付けられていることを確認してください。



- ② **本体の準備4**(取扱説明書8ページ 本体の準備 「4.」の記載事項です)


電源入/切ボタンを押しポンプを始動させ、吸引圧調整ツマミを右回りに閉め切り、空気漏れがないように吸引ホースの吸引口を指で塞ぐか、吸引ホースを折り曲げ、圧力計が-40kPa以上を指すことを確認してください。次に吸引圧調整ツマミを左回りに開き切ったときに圧力計が0を指すことを確認してください。

※上記の点検で異常があった場合や、電源が入りにくい等の症状を確認されたお客様につきましては本書面末尾の【お問い合わせ】先にご連絡ください。

## 2. ご使用後のお願い

ご使用後は、速やかにホース付フィルタを本体接続口から外し、電源を入れて10秒程度作動させてください。

本体内部の空気を入れ替え、結露を予防するために、必ずご実施ください。

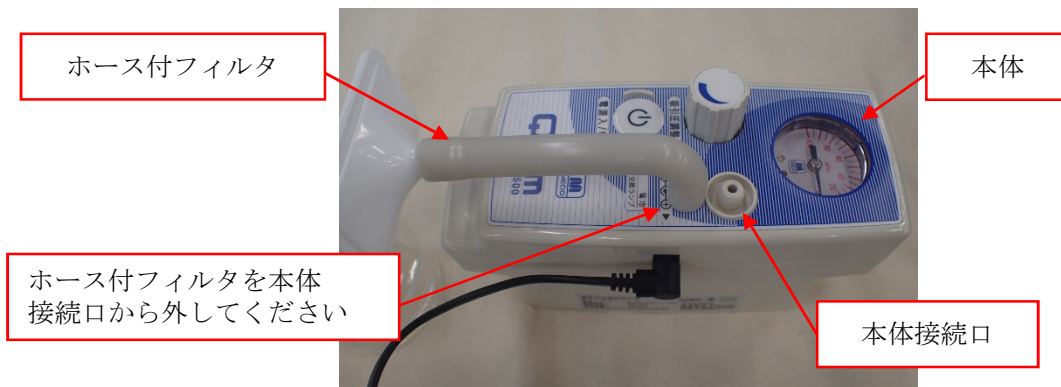

### 3. お手入れのお願い

#### 吸引ボトル、吸引ホースの洗浄方法

(取扱説明書9ページ 吸引ボトル、吸引ホースの洗浄方法 の追加お願い事項です)

洗浄時はホース付フィルタを本体接続口と吸引ボトルから外し、吸引ボトル・吸引ホースをそれぞれ外した状態で洗浄してください。洗浄後はよく乾かしてください。



### 4. 代替の吸引手段をご常備ください

まれな事例ながら、本機器が動作せずご使用頂けなくなる事例が報告されております。念のため本機器とは別に、手動式、足踏み式吸引器などの代替吸引手段を、常に(特に、長時間外出のご携行など)お手元に置いて頂きますようお願いいたします。

※代替手段のご用意が難しい場合は、末尾の【お問い合わせ】先にご連絡ください。


### 5. 受領書返信のお願い

同封しました郵便はがきの裏面にございます「受領書」へ、確認日、確認者、製造番号をご記入の上、返信頂きますようお願いいたします。

※受領書の記載に含まれる個人情報は、本書面がご愛用の皆様にご受領、ご確認をいただけたことを弊社が確認する目的にのみ利用させていただきます。個人情報の管理は弊社の定める個人情報保護の方針に従い厳重に行います。

#### ※製造番号の見方

吸引器本体側面ラベルの、8桁の数字です。

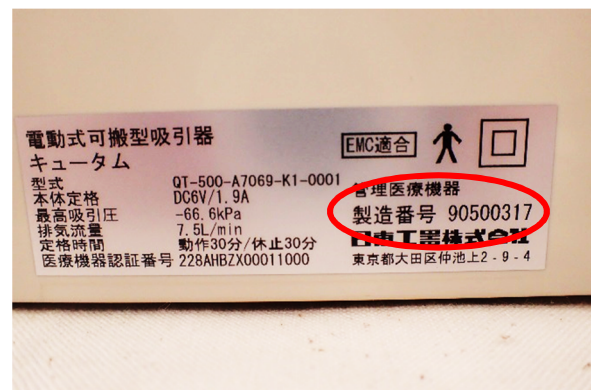

【お問い合わせ】 日東工器株式会社 リニア事業部 リニア品質保証部品質保証課  
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4  
フリーコール:0120-679-130(受付時間 8:45~17:15 土日祝日を除く)  
FAX:03-3755-5294  
E-mail:l-hinkan@nitto-kohki.co.jp