



逐次型空気圧式マッサージ器

# DVTメドマー DVT-2B トラブルシューティング


※ご使用の際は必ず添付文書及び取扱説明書をお読みください。

医療機器認証番号:302AHBZX00006000  
類 別:機械器具12 理学療法用器具  
(JMDNコード16837000)

一般的名称:逐次型空気圧式マッサージ器  
クラス分類:II (管理医療機器)  
特定保守:該当

## トラブルシューティング

異常が発生した場合：警告音とバッテリー残量ランプの表示でお知らせします。  
運転開始・停止ボタンを押し、エラー状態を解除してから下表に従って処置をしてください。

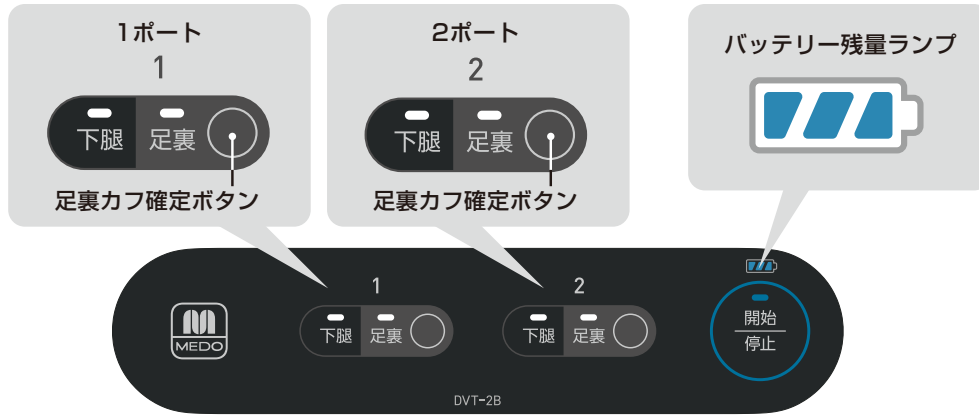

表示順	バッテリー残量ランプの表示	トラブル	原因	処置
↓		本体を操作できない。	バッテリー残量の低下	バッテリーを充電してください。
			内部異常	お求めの販売店に修理・点検の依頼をしてください。
↓	パターンA	足裏カフが加圧されない。	足裏カフ確定ボタンが押されていない。	<b>パターンA</b> 1ポート側の足裏カフ確定ボタンを押してください。
	パターンB			<b>パターンB</b> 2ポート側の足裏カフ確定ボタンを押してください。
	パターンC			<b>パターンC</b> 1ポート、2ポートの足裏カフ確定ボタンを押してください。
↓	パターンA	運転開始後に停止する。	ホースが折れ曲がっていたり、重いものが載って潰れている。	<b>パターンA</b> 1ポート側のホースの折れを直したり、重いものを取り除いてください。
	パターンB			<b>パターンB</b> 2ポート側のホースの折れを直したり、重いものを取り除いてください。
↓		運転開始・停止ボタンを押した後に停止する。	ホース先端の回転ロックプラグが、本体のポートに接続されていない。	ホース先端の回転ロックプラグを本体のポートに接続してください。
			ホースとカフが接続されていない。	ホースとカフを接続してください。

表示順	バッテリー残量ランプの表示		トラブル	原因	処置
↓	パターンA 	パターンB 	運転開始後に 停止する。	カフやホースに 穴が開いている。	<b>パターンA</b> ホースに穴が開いていた場合 1ポート側のホースを新品と 交換してください。
	パターンA 	パターンB 		ホースが 抜けている。	ホースが抜けていた場合 ホースを接続してください。
↓	パターンA 	パターンB 	本体を操作 できない。	<b>パターンA</b> バッテリー温度が 高温になっている	バッテリーが正常な 温度範囲になるまで待ち、 再度運転開始・停止ボタ ンを押してください。
				<b>パターンB</b> バッテリー温度が 低温になっている	

※エラー中、バッテリー表示ランプは上記の表示を繰り返します。

●その他のトラブルについて

トラブル	原因	処置
加圧の順番がおかしい	下腿カフを逆向きに接続して いませんか。	P.11『カフの装着』のイラストと同じ向きで 装着してください。 
バッテリー運転時間が 短い	長期間電源コードを 電源コンセントに接続したまま 使用・保管していませんか。	バッテリーを25%の状態（警告音が鳴る状態）に なるまで本機を使用した後、電源コードを電源 コンセントに接続しバッテリーの充電を行う。 もしくは充電しながら本機を使用してください。 それでも改善されない場合はP.14『バッテリーの 交換方法』に従ってバッテリーを交換してください。
バッテリー運転ができない （商用電源に接続しても 運転ランプが消灯している）	バッテリーが外れていませんか。	P.14『バッテリーの交換方法』に記載の 通り、正しくバッテリーが接続されているか 確認してください。
手動で足裏カフ検知状態 から下腿カフ設定に 変更できない	足裏カフ確定ボタンを押して すぐ離していませんか。	足裏カフ確定ボタンを2秒以上 長押ししてください。
	本体内部異常。	電源プラグを抜きお求めの販売店に 修理・点検を依頼してください。

※上記の点検後もなお異常がある場合には、直ちに使用を中止し、お求めの販売店に点検・修理を依頼してください。  
※記載のページ数は取扱説明書のものです。

製造販売元

**日東工器株式会社**

本社・研究所 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4  
Tel:03-5748-5521

ホームページ [www.nitto-kohki.co.jp](http://www.nitto-kohki.co.jp)

 ●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）  
受付時間 AM8:30～PM5:15  
**0120-210-216**